

УТВЕРЖДЕНА

Приказом Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития
(Росздравнадзора)
от 19.01.2009г № 199-Пр/09

ИНСТРУКЦИЯ

по применению изделия медицинского назначения

Лейкопластырь медицинский

НАНОПЛАСТ ФОРТЕ[™]
nanoplast forte[™]

СОСТАВ: магнитный порошок из редкоземельных металлов, нанопорошок-продуцитор инфракрасного излучения в далекой инфракрасной области спектра.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ.

Данный пластырь изготовлен на основе современных нанотехнологий, достижений традиционной и народной медицины.

Пластырь обладает обезболивающим, противовоспалительным и мышечно-расслабляющим действиями, способствует восстановлению функции опорно-двигательного аппарата (суставов, мышц и связок), а также более быстрому восстановлению и уменьшению последствий закрытых травм мягких тканей, опорно-двигательного аппарата (ушибов, растяжений связок и мышц, вывихов суставов, кровоподтеков и кожных гематом и т.д.).

Сочетанное воздействие инфракрасного (теплого) излучения и магнитного поля приводит к улучшению местного (локального) крово- и лимфообращения, уменьшению застоя крови и улучшению венозного оттока, уменьшению воспалительной реакции: отека, боли. Улучшает местный метаболизм, расслабляет мышцы и связки. Способствует восстановлению функции опорно-двигательного аппарата, уменьшению гематом и кровоподтеков при травмах мягких тканей и суставов.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- артриты, в том числе ревматические,
- артрозы, остеоартроз, в том числе коленного, тазобедренного и плечевого суставов,
- спондилоартрозы,
- шейный остеохондроз, в том числе его проявления в виде головной боли, головокружений, нарушений чувствительности верхних конечностей,
- грудной остеохондроз,

- межреберные невралгии,
- поясничный остеохондроз, люмбаго, ишиас,
- другие заболевания позвоночника, сопровождающиеся локальным болевым синдромом,
- боли в шее, спине, поясничной области на фоне остеохондроза и ущемления нервов,
- закрытые травмы мягких тканей – ушибы, растяжения мышц и связок, вправленные вывихи суставов, кожные гематомы и кровоподтеки,
- спортивные травмы.

СПОСОБ И УДОБСТВО ПРИМЕНЕНИЯ.

Только для наружного применения!

Пластырь не требует предварительной обработки.

Снять защитный слой. Зафиксировать пластырь на сухом участке кожи в беспокоящей области.

Пластырь одноразовый. Не подлежит повторному использованию!

В отличие от мазей, кремов и гелей, пластырь не оставляет следов на коже и одежде, снимается легко и безболезненно, фиксирующий материал имеет телесный цвет. Использование пластыря удобно и комфортно, не ограничивает движений, не меняет привычный образ жизни.

Для удобства применения в зависимости от локализации беспокоящей области выпускается пластырь двух размеров: 7х9 см и 9х12 см.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

Рекомендуется держать на коже не более 12 часов. Следующий пластырь использовать не ранее чем через 6 часов после снятия предыдущего.

При лечении обострений хронических заболеваний суставов и позвоночника рекомендуется использование пластыря курсами в среднем до 9 дней с последующими перерывами от одной недели.

При лечении острого болевого синдрома – использовать пластырь от 3 до 9 дней.

При лечении спортивных травм, ушибов мягких тканей, растяжений связок и мышц, гематом и кровоподтеков в зависимости от тяжести состояния использовать от 3 до 6 дней. В отдельных случаях - до 9 дней.

Пластырь может быть использован в сочетании с физиотерапевтическими методами лечения, а также ЛФК и массажем.

Применять с осторожностью, если кожа подвержена аллергии.

Появление чувства легкого жжения и тепла в области лечебного воздействия пластыря является нормальной реакцией и не требует прекращения использования.

СОВМЕСТИМОСТЬ.

Пластырь может быть использован в составе комплексной терапии, совместим с лекарственными препаратами, за исключением

одновременного использования других наружных средств на одних и тех же участках кожи.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ.

Редко возможны аллергические реакции на отдельные компоненты пластыря на коже людей, склонных к аллергическим реакциям, особенно на фоне повышенного потоотделения, в виде высыпаний и зуда, чаще быстропроходящих. При возникновении стойких реакций – прекратите использование и обратитесь к врачу.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.

Беременность, открытая рана.

ФОРМА ВЫПУСКА.

Один или более запаянный пакет по три пластыря 7х9 см или 9х12 см в каждом, уложены в картонную коробку с вложенной инструкцией по применению.

Запаянный пакет по три пластыря 7х9 см или 9х12 см без картонной коробки.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Хранить лейкопластырь, в том числе и во вскрытой упаковке, необходимо в сухом помещении при комнатной температуре в недоступном для детей месте. Защитную пленку необходимо снимать непосредственно перед применением. Пластырь из вскрытой упаковки пригоден к применению в течение не более 30 дней.

СРОК ГОДНОСТИ.

5 лет.

Не использовать после срока годности, указанного на упаковке.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА.

Без рецепта врача.

Производство «Гуйчжоу Мяояо Фармасьютикл Ко., Лтд»,
(Guizhou Miaoyao Pharmaceutical Co., Ltd), КНР

Р.У. № ФСЗ 2008/03447 от 19.01.2009г

Представительство в России: ООО «НаноТек Фарма»,
Москва, пр-кт Вернадского, 29 – 1307, e.mail: info@nanotechpharma.ru
www.nanoplast-forte.ru